

Vartojimo nurodymai

„QUIXX[®] acute“

Hipertoninis jūros vandens nosies purškalas / aerosolis, skirtas nosies priežiūrai ir natūraliai palengvinti slogą

„QUIXX[®] acute“ sudėtyje nėra vaistinių medžiagų. Tai sterilus ir bekvapis purškalas nosiai drėkinti ir padėti palengvinti slogą, susijusią su sinusitu, nosies užsikimšimu, šienlige, kitomis alergijomis bei nosies priežiūrai po operacijų. Priemonėje yra 2,6 % druskos koncentracija, kuri sukelia hiperosmozinį poveikį ir tokiu būdu padeda natūraliai palengvinti slogą.

„QUIXX[®] acute“ **sudedamosios dalys:** natūralus jūros vanduo (praskiestas išgrynintu vandeniu iki 2,6 %)

Kaip „QUIXX[®] acute“ palengvina kvėpavimą

- Tai natūrali nosies valymo priemonė ir pagalba pasireiškus slogai.
- Padeda sumažinti dėl peršalimo, gripo alergijų ar alerginio rinito sudirgusių nosies ląsčių užsikimšimą.
- Skystina gleives, todėl palengvina nosyje esančių išskyrų pašalinimą, pavyzdžiui, sergant peršalimo ligomis arba alerginiais susirgimais.
- Palengvina vietinius ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų (VKTI) bei ūminio ir lėtinio rinosinusito simptomus.

„QUIXX[®] acute“ **taip pat pasižymi tokiais privalumais:**

- Priemonės sudėtyje nėra vaistinių medžiagų, jis nesukelia pripratimo ir gali būti vartojamas ilgą laiką.
- Galima laikyti horizontalioje padėtyje, nes priemonė neprateka.
- Galima vartoti iki paskutinio lašo (kol talpyklėje nieko nelieka).
- Nosies tirpale nėra jokių suslėgtų dujų, priemonė yra sterili ir be konservantų.

Kas gali vartoti „QUIXX[®] acute“

Vaikai nuo 3 metų amžiaus ir suaugusieji.

„QUIXX[®] acute“ taip pat galima vartoti nėštumo ir žindymo laikotarpiu.

Kaip vartoti „QUIXX[®] acute“

„QUIXX[®] acute“ visada vartokite tiksliai taip, kaip aprašyta šiuose vartojimo nurodymuose. Jei abejojate, kreipkitės į gydytoją ar vaistininką.

Priemonę rekomenduojama vartoti taip:

„Quixx® acute“ vartokite iki 5 kartų per parą, kol vargina užsikimšusi nosis ar sausi nosies takai.

1. Jei reikia, iš nosies pašalinkite išskyras.
2. Nuo priemonės purkštuko nuimkite gaubtelį.
3. Talpyklę laikykite bet koku kampu ir švelniai įstumkite purkštuką į nosies šnervę.
4. Galvą truputį palenkite į priešingą pusę, nei šnervė, kurią ketinate išvalyti.
5. Nuspauskite ir 1–2 sekundes palaikykite nuspaudę talpyklės viršuje esantį įpurškimo mygtuką.
6. Įpurškite į vieną, o tada – į kitą nosies šnervę.
7. Kiekvieną kartą panaudoję, nuvalykite ir nusauskite purkštuką ir vėl uždėkite gaubtelį.
8. Nosį skalaujant, priemonę rekomenduojama vartoti virš kriauklės ar rezervuaro.

Laikantis higienos ir siekiant išvengti kryžminės taršos tarp vartotojų, talpyklę gali naudoti tik vienas vartotojas.



Kontraindikacija

Žinomas jautrumas bet kuriai priemonės sudėtyje esančiam medžiagai.

Atsargiai

Slėginė talpyklė. Kaitinama gali sprogti.

- Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti.
- Nepradurti ir nedeginti net panaudotos.
- Saugoti nuo saulės šviesos.
- Nelaikyti aukštesnėje kaip 50° C/122° F temperatūroje.
- Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

Atsargumo priemonės

- Jei šią priemonę naudoja daugiau kaip vienas asmuo, gali išplisti infekcija. Kiekvieną kartą panaudoję purkštuką išplaukite muiliname vandenyje ir nuskalaukite karštu vandeniu.

Nereceptinė medicinos priemonė

Tinkamumo laikas

36 mėnesiai.

Pirmą kartą atidarius pakuotę, priemonę reikia suvartoti per 12 mėnesių. Tirpalas lieka sterilus iki paskutinio lašo, nes naudojama speciali purškimo mygtuko technologija „maišelis ant vožtuvo“.

Nenaudokite pasibaigus tinkamumo vartoti laikui.

Laikymo sąlygos

Laikyti nuo 15 °C iki 30 °C temperatūroje.

Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

Pakuotės dydis

100 ml

[Simbolis 5.1.1 gamintojas DIN EN ISO 15223-1:2012]

Gamintojas

AURENA LABORATORIES AB, Fjärrviksvägen 22, SE-65350 Karlstadas, Švedija

[CE ženklas] 0413

Platintojas

Berlin-Chemie AG (Menarini Group), Glienicker Weg 125, 12489 Berlynas, Vokietija

Peržiūros data

2017 m. vasario mėn.

[Simbolis 5.2.4 sterilizuota spinduliais DIN EN ISO 15223-1:2012]

[REF 1018-6]

[Versija: MMMM-MM-DD]

[Simbolis 5.1.5 SERIJA DIN EN ISO 15223-1:2012]

[Simbolis 5.1.4 smėlio stiklas DIN EN ISO 15223-1:2012]

Žr. talpyklės / dėžutės apačią

[Kalbos kodo simboliai kiekvienai versijai pagal ISO-639-1]